

Istruzioni per la miscelazione Dual Rinse® HEDP

Miscelare immediatamente prima dell'uso! Dopo un'ora, in presenza di HEDP l'NaOCl inizia a degradarsi.




1. Versare 10 ml di ipoclorito di sodio (NaOCl) per uso dentale o di una soluzione di cloruro di sodio sterile in un recipiente di miscelazione sterilizzato.
2. prire con attenzione una capsula di Dual Rinse® HEDP sul recipiente di miscelazione.



3. Lasciar cadere lentamente la polvere nella soluzione.
4. Mescolare con una spatola sterile per non più di 2 minuti.



5. Aspirare la soluzione limpida in una siringa da risciacqui.
6. Applicare la cannula di risciacquo, fatto!

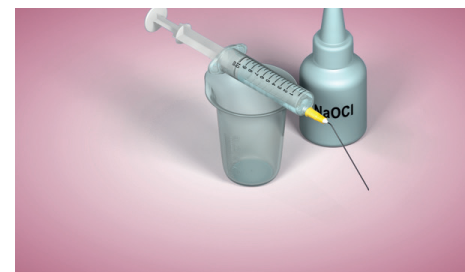

Per ulteriori informazioni:
www.medcem.eu
www.medcem.ch